

<b>URINES POUR HLM (débit d'hématies - leucocytes par minute)</b>	
<b>Indications</b>	Mesure du débit des hématies et des leucocytes passant dans les urines.
<b>Renseignements cliniques</b>	Contexte de la demande
<b>Conditions de prélèvement</b>	Ce recueil s'effectue sur la totalité des urines émises en 3 heures.
<b>Matériel</b>	Flacon pour HLM
<b>Techniques de prélèvement</b>	<p><b>3 heures avant le lever habituel :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vider la totalité de la vessie dans les toilettes.</li> <li>- Boire un grand verre d'eau.</li> <li>- Se recoucher et rester allongé au repos pendant 3 heures.</li> </ul> <p><b>Après ces 3 heures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uriner dans le flacon fourni par le laboratoire</li> <li>- pour recueillir la <b>totalité</b> des urines.</li> <li>- Noter la date et l'heure sur le flacon.</li> <li>- Identifier le flacon (nom et prénom, si cela n'a pas été fait par le laboratoire)</li> </ul> <p><b>Attention :</b> dans l'intervalle des 3 heures, toutes les urines émises doivent être récupérées dans le flacon</p>
<b>Transport et conservation</b>	Conservation à température ambiante (15-25°C). Acheminer le flacon dans les plus brefs délais.